



Resina Acrílica e Líquido Autopolimerizável para Ortodontia.



Produto: Resina Acrílica e Líquido Autopolimerizável para Ortodontia – orto cor

Composição:

- Pó: Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis

Embalagem:

- Pó: Elétricas, Concentradas e Incolor: 20g, 80g, 225g, 500g, 1000g.
- Líquido: 20ml, 80ml, 225ml, 50ml, 1000ml.

Cores:

- Elétricas: Limão, Pink, Flamingo, Lilás, Rubi, Verde e Azul
- Concentradas: Preto, Branco, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo e Marrom
- Incolor

Indicação:

- Para confecção de aparelhos ortodônticos, ortopédicos removíveis, placas de mordida e reparos em geral



Contraindicações:

- O material contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele ou outras reações alérgicas em pessoas suscetíveis.

Instruções de Uso:

- Pode ser utilizado com o Líquido Acrílico Autopolimerizável Orto.
- A técnica aplicada, consiste em pingar gotas de resina pó sobre um determinado molde, criando a cor de gengiva desejada e posteriormente, gotejar Resina Líquida Acrílica sobre esta resina e prensa lá, para fazer peça, com a cor que foi criada.

Condições de Armazenamento:

- Mantenha ao abrigo de calor e luz, fechado em local fresco e seco.

Advertências/Precauções:

- Apenas para uso odontológico.
- Líquido: Material inflamável e não tóxico (Ponto de fulgor: 10°C/50°F).
- O descarte deve ser realizado de acordo com as regras vigentes em cada localidade .
- A resina em pó possui um iniciador de polimerização orgânica que se degrada quando o armazenamento é feito de forma incorreta, expondo o produto a temperaturas extremamente altas.
- É recomendado o manuseio do produto em lugares com ventilação, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção. Não é recomendado o manuseio do produto por grávidas, lactantes e pessoas alérgicas a algum componente da fórmula.
- Pessoas suscetíveis podem apresentar irritações na pele.
- Conservar ao abrigo de luz e calor. Manter em ambiente seco e fresco.
- Proibido o descarte de resíduos em esgotos, cursos d'água e lixos domésticos.
- Produtos incompatíveis com a resina/monômero: álcool, água, clorofórmio, acetona, vaselina e outros solventes semelhantes.
- A base dos dentes sintéticos deve ser aprontada de acordo com as Instruções de Uso para a correta adesão da prótese.
- Não recomendamos a utilização de solventes de cera. O residual pode causar uma menor ligação dos dentes com a base acrílica.
- Recomenda-se polimento mecânico para todos os tipos de resina.



PRIMAVITA ORTO

Validade:

- Pó: 10 anos a partir da data de fabricação.
- ANVISA Pó: aguarda registro.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291.