

Fórmula elaborada para isolamento de trabalhos protéticos.

Produto:

Isolante

Composição:

- Alginato de Sódio.
- Água desmineralizada.
- Conservantes

Indicações:

Proporciona perfeito isolamento entre o gesso e a resina acrílica.



Características Técnicas:

- Para uso de forma convencional e micro-ondas;
- De secagem rápida e fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez, com excelentes propriedades isolantes;
- Devido a espessura do filme adequada, não causa alterações dimensionais

Apresentação:

Frascos de 120 ml, 250 ml, 500 ml e 1.000 ml.

Instrução de Uso:

- Usar modelo de gesso previamente hidratado.
- Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície isolada com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes.
- Quando fizer uso de filme separador na primeira prensagem, retire e limpe o excesso e aplique o isolante PRIMAVITA.

Segurança:

- Não inflamável;
- Em contato com os olhos, lave com água em abundância;
- Caso ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico